

# Aldosterone

## תיאור הבדיקה

### **CPT קוד**

82088

### **שם הבדיקה**

Aldosterone

### **שמות נוספים לבדיקה**

אלדוסטרון

### **לאבחנה/טיפול**

1. חלק מפאנל בדיקות לאיבחון אלדוסטרוניזם ראשוני או אלדוסטרוניזם משני. 2. חלק מברור הסיבות לקושי בייצוב לחץ דם. 3. חלק מבירור מצבים של אי-סדירות של אלקטרוליטים בדם ובשתן. 4. חלק מברור הסיבות לתפקוד לקוי של בלוטת האדרנל (אי ספיקה או ספיקת-יתר של האדרנל, כולל ברור ממאירויות של הבלוטה).

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

Chemiluminesce/Immunoassay

## פרטי מעבדה מבצעת

### **מעבדה מבצעת**

[אנדוקרינולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

## המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

מצב זקוף/מאמץ: לפחות שעה של הסתובבות או הליכה. מצב שכיבה/מנוחה: לפחות 15 דקות של שכיבה.

### סוג הדגימה

דם

### נפח דגימה

5 מ"ל

### כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב. לקחת במבחנה נפרדת מרנין

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לציין מצב הנבדק (במצב זקוף/במאמץ או בשכיבה/במנוחה).

## תנאי שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

pmol/L

### תחום ערכים תקינים

ילדים עד גיל 12: 1210.7-177.6 מבוגרים: במצב זקוף/מאמץ: 1086-69 בשכיבה/מנוחה: 643-48

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

UK NEQAS for Steroid Hormones

### בקרת איכות חיצונית חלופית

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

## הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

## שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 5 ימי עבודה ובהתאם לדחיפות

## **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות