

Homovanillic (HVA), CSF

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83593

שם הבדיקה

Homovanillic (HVA), CSF

שמות נוספים לבדיקה

שדרה עמוד בנוזל (HVA) נוירטרנסמיטורים, Neurotransmitters

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

המעבדה הקולטת את הדגימה

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

CSF

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנות להקפאה אטומות לאור

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש להקפיא CSF מיד בחנקן נוזלי. אם יש דם בדגימה, ברזל מתאי הדם יכול להשתחרר ולגרום לדגרדציה של החומרים הנבדקים. יש לשים את הדגימה על קרח ולסרכז בתוך חמש דקות. את הנוזל העליון הצלול יש להעביר למבחנה נקייה ולהקפיא.

תנאי שינוע

קרח יבש/חנקן נוזלי, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בהקפאה עמוקה שנתיים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

nmol/L

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM Neurotransmitter in CSF

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

28 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

יש לשלוח אנמנזה עם הדגימה