

Oxalic acid, Spot Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83945

שם הבדיקה

Oxalic acid, Spot Urine

שמות נוספים לבדיקה

אקראי שתן, אוקסלית חומצה, Oxalate

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

נבדק: יש להמנע מצריכה מוגברת של ויטמין C (מעל 2 גרם ב-24 שעות) לפני הדיגום. הבדיקה מיועדת לנבדקים מתחת לגיל 17 בהתייעצות עם נפרולוג.

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתן ללא תוסף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שתן להקפיא

תנאי שינוע

בקירור $4-8^{\circ}\text{C}$ או בהקפאה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

60 יום

קריאת תוצאות

יחידת מידה

mg/mg creatinine

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP Kidney Stone Risk Assessment, KSA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

30 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות