

Acyl Carnitine, Profile DBS

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82017

שם הבדיקה

Acyl Carnitine, Profile DBS

שמות נוספים לבדיקה

יבש בדם, קרניטין אציל פרופיל, AcylCarnitine

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם יבש

נפח דגימה

4 טיפות דם גדולות ספוגות על הנייר בעגולים במסומנים

כלי קיבול לדגימה

נייר Guthrie

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לחכות ליבוש הדם להעביר לשקית Hazard Bio. יש לשלוח אנמנזה.

תנאי שינוע

עד 25 מעלות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודש

קריאת תוצאות

יחידת מידה

$\mu\text{mol/L}$

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM Acylcarnitine in DBS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

35 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

יש לשלוח אנמנזה עם הדגימה