

QuantiFERON-TB

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87556

שם הבדיקה

QuantiFERON-TB

שמות נוספים לבדיקה

QuantiFERON-TB / IGRA

לאבחנה/טיפול

שחפת חבויה

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 259

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום עם המעבדה, גורמים מחוץ לבית החולים: לאחר תאום בלבד. יש לצרף טופס מלווה .

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

7 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה ליתיום הפרין בלבד- מבחנה מלאה - 6 מ"ל לפחות

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקיחה לנבדקים שאינם מאושפזים מבוצעת במכון גסטרו בצרוף הפניה וטופס 17 או התחייבות בשעות 00:00-12:00 בימים א'-ד' בלבד. אין לבצע דיגום ביום ה' או יום לפני ערב חג. שמירה לאחר לקיחה בטמפ' חדר.

תנאי שינוע

בתוך בית החולים: ניתן לקחת דגימה לבדיקה בימים א'-ד' בלבד, ורק אם תועבר ידנית ומיידית בציון שעת הלקיחה למעבדת גסטרו חדר 258. שמירה לאחר לקיחה בטמפ' חדר. במידה ויגיע ביום ה' או ביום לפני ערב חג לא ניתן יהיה לבצע את הבדיקה והיא תיפסל.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מועבר מיידית בטמפ' חדר למעבדת גסטרו

קריאת תוצאות

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

חיובי / שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות