

כיחתרבית אירובית

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8707087205

שם הבדיקה

כיחתרבית אירובית

שמות נוספים לבדיקה

מטרכיאוסטומיה מטובוסכיה מגורהשאיבה כיחחSputum

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בדרכי הנשימה

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטות Diffusion Disk וב-Test Gradient.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

כיח: לאחר שטיפת הפה ושעול עמוק, יש לקחת הפרשות צמיגות, לא רוק. כיח מגורה: לאחר אינהלציה בסלין היפרטוני ושטיפת הפה, דיגום משעול עמוק, יש לקחת הפרשות צמיגות, לא רוק. שאיבה מטובוס / כיח מטרכיאוסטומיה: החדרת צינורית לפתח הטרכיאוסטומיה/הטובוס תוך מגע מינימאלי בדפנות. שאיבה למבחנה ייעודית בזמן הוצאת הצינור.

סוג הדגימה

כיחכיח מגורה שאיבה מטובוס כיח מטרכיאוסטומיה

נפח דגימה

עד 5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית או מבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מהר ככל האפשר

קריאת תוצאות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. צביעת גרם - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך CLSI - Gradient Test - M-100: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing - Guide Application Test-E ולהוראות השימוש מצורפות לכל פריט. ניתן לפנות ל-

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP D

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבות אירובית שלילית- 7 ימים/תרבות אירובית/אנאירובית/פטריות חיובית - 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

הערות

הערות

אין