

Homocysteine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83090

שם הבדיקה

Homocysteine

שמות נוספים לבדיקה

הומוציסטאין

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Two step: Reduction and Enzymatic Conversion (AU5800)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אחרי צום 8 שעות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת פקק צהוב (ג'ל+זרז קרישה)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

ניתן לשלוח בטמפרטורת החדר עד שעתיים לאחר לקיחה. אם המשלוח מאוחר יותר, לשמור בקירור ולשלוח בקרח.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 days at 2-8°C

קריאת תוצאות

יחידת מידה

umol/L

תחום ערכים תקינים

May-15

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-CARDIAC MARKERS PROGRAM

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7