

Rivaroxaban- Xarelto

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80299

שם הבדיקה

Rivaroxaban- Xarelto

שמות נוספים לבדיקה

factor Xa inhibitor rivaroxaban, Rivaroxaban- Xarelto

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPChromogenic-enzymatic activity on small substrates

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 03-530-3671:14:00. כל ימות השבוע משעה 15:00: 03-530-2100

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לציין את מינון התרופה והזמן שעבר מקבלת תרופה האחרונה

סוג הדגימה

פלסמה (Citrates Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ציטרטפק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

מנע קונטמינציה על ידי נוגדי קרישה להקפיד על יחס אנטיקואגולנט-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה, מיד לאחר לקיחה.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, לא מעל 25 מעלות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 שעות

קריאת תוצאות

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

אין משמעות. מדידת רמת תרופה בדם

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיק/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

רגיל 60 דקות דחוף 40 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

נא לציין בהזמנה זמן לקיחה יחסית לקבלת תרופה (שיא או שפל) מיועד למדידת רמת התרופה
בלבד Rivaroxaban- Xarelto