

Activated partial thromboplastin time (PTT)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85730

שם הבדיקה

Activated partial thromboplastin time (PTT)

שמות נוספים לבדיקה

(PTT) מופעל חלקי טרומבופלסטין זמן , partial thromboplastin time

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPClot detection photometry

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 03-530-3671 14:00:03-530-3671 במשמרות: 03-5302100 או 03-5302747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בגלל השפעת הפרין על תפקודי קרישה נא לדגום כשעתיים אחרי טיפול בהפרין

סוג הדגימה

פלסמה (Citrates Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ציטרטפק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

מנע קונטמינציה על ידי נוגדי קרישה להקפיד על יחס אנטיקואגולנט-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה, מיד לאחר לקיחה.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, לא מעל 25 מעלות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 8 שעות בטמפרטורת החדר

קריאת תוצאות

יחידת מידה

שניות

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: *40-26 ערכים תקינים תלויים מעט בריאגנט שבשימוש. מעודכנים בלימס ומצורפים לדוח התוצאות

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

רגיל 60 דקות דחוף 40 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

המוליזה חזקה משפיעה על תוצאות הבדיקה