

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82657

שם הבדיקה

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

שמות נוספים לבדיקה

אנגיוטנסין המרת אנזים (ACE)

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Enzymatic colorimetric(AU5800)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לבירורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אם הנבדק מטופל בקפטופריל (captopril), יש להפסיק את הטיפול 12 שעות לפני הדיגום

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 days at 4°C 6 months at -20°C.

קריאת תוצאות

יחידת מידה

U/L

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 5-33

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS IMMUNOASSAY

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

זיהום ב- EDTA או יונים של מתכות כבדות יגרים לירידה משמעותית הפעילות האנזים