

# Bicarbonate

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

82803

**שם הבדיקה**

Bicarbonate

**שמות נוספים לבדיקה**

ביקרבונט ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{TCO}_2$ ,  $\text{Total CO}_2$

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Rapid Point 500 Calculated

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

על-אוטומטית

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

על-אוטומטית

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

### **דיגום ושינוע הבדיקה**

#### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

אין הוראות מיוחדות

#### **סוג הדגימה**

דם מלא

#### **נפח דגימה**

2 מ"ל

#### **כלי קיבול לדגימה**

מזרק שטוף בהפריןסגור היטב בסגר יעודי

#### **תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לקיחה ללא חשיפה לאויר, הקפד לרוקן שאריות הפרין, סגור מיד בסגר פלסטי, שלח מיד למעבדה.

## תנאי שינוע

שלח מיד למעבדה.

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

30 דקות

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

mmol/l

### תחום ערכים תקינים

נשים/גברים (וריד): 22-27 נשים/גברים (עורקי): 22-26

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP-AQ - Aquerous Blood Gas

### בקרת איכות חיצונית חלופית

### הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

### **שם הגוף המסמך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

### **מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

30 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7

### **הערות**

#### **הערות**

מבוצע רק במסגרת פנל הגזים