

Creatine phosphokinase total (CPK)

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82550

שם הבדיקה

Creatine phosphokinase total (CPK)

שמות נוספים לבדיקה

סך קריאטין פוספוקינאז (CPK)

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic UV test (AU5800)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להמנע מדיגום אחרי פעילות גופנית נמרצת

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בקרור ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 hours at 15-25°C 3 days at 2-8°C

קריאת תוצאות

יחידת מידה

IU/L

תחום ערכים תקינים

גברים: קטן מ-190 נשים: קטן מ-170

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

המוליזה- עליה ניכרת בערך הנמדד ביצוע מפלזמה יכול לתת לעיתים ערכים נמוכים שיקריים