

Epstein-Barr Virus (EBV) IgM

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86790

שם הבדיקה

Epstein-Barr Virus (EBV) IgM

שמות נוספים לבדיקה

נגיף אפשטיין-בר IgM

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפרטורת חדר עד 24 שעות

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, לשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש לבצע הפרדה מהתאים ולשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדה: טמפרטורת החדר: 3 ימים. בטמפ' 2-8 מעלות: 14 ימים.

קריאת תוצאות

יחידת מידה

S/CO

תחום ערכים תקינים

1-0 (שלילי)

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality-

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיק/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

2 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע רק במשמרת בוקר

הערות

הערות

מבוצע ללקוחות מחוץ לשיבא בלבד, אחרת פנה למעבדה לנגיפים המוליזה חזקה עלולה לשבש את המדידה