

Sodium-blood

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84295

שם הבדיקה

Sodium-blood

שמות נוספים לבדיקה

נתרן בדם

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ISE Indirect(AU5800)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

2 weeks at 2-25°C

קריאת תוצאות

יחידת מידה

meq/l

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 136-148

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

ליפמיה חזקה (וגם היפרפרוטאינמיה) - ירידה משמעותית בערך הנמדד במדידה עקיפה, מומלץ לבצע במסגרת פנל הגזים (מדידה ישירה). המוליזה חזקה - ירידה בערך הנמדד