

T3, Free

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84480

שם הבדיקה

T3, Free

שמות נוספים לבדיקה

Free Triiodothyronine, T3 חופשי

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Dxl 800Immunometric-Chemiluminescence

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

15-25°C at hour 8 2-8°C at days 2 הפרדה תוך שלוש שעות מלקיחה:בסרום או פלזמה

קריאת תוצאות

יחידת מידה

pmol/l

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 3.3-7.2

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS IMMUNOASSAY

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

120 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

תתכן עליה משמו משמעותית לאחר נטילת ביוטין