

Aldosterone

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82088

שם הבדיקה

Aldosterone

שמות נוספים לבדיקה

אלדוסטרון

לאבחנה/טיפול

1. חלק מפאנל בדיקות לאיבחון אלדוסטרוניזם ראשוני או אלדוסטרוניזם משני. 2. חלק מברור הסיבות לקושי בייצוב לחץ דם. 3. חלק מבירור מצבים של אי-סדירות של אלקטרוליטים בדם ובשתן. 4. חלק מברור הסיבות לתפקוד לקוי של בלוטת האדרנל (אי ספיקה או ספיקת-יתר של האדרנל, כולל ברור ממאירויות של הבלוטה).

שיטת ביצוע הבדיקה

Chemiluminesce/Immunoassay

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

מצב זקוף/מאמץ: לפחות שעה של הסתובבות או הליכה. מצב שכיבה/מנוחה: לפחות 15 דקות של שכיבה.

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב. לקחת במבחנה נפרדת מרנין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לציין מצב הנבדק (במצב זקוף/במאמץ או בשכיבה/במנוחה).

תנאי שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

pmol/L

תחום ערכים תקינים

ילדים עד גיל 12: 1210.7-177.6 מבוגרים: במצב זקוף/מאמץ: 69-1086 בשכיבה/מנוחה: 48-643

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

UK NEQAS for Steroid Hormones

בקרת איכות חיצונית חלופית

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 5 ימי עבודה ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות