

Thyroid peroxidase Ab.(Anti TPO)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86376

שם הבדיקה

Thyroid peroxidase Ab.(Anti TPO)

שמות נוספים לבדיקה

נוגדנים עצמיים כנגד תירואיד פראוקסידאז (אנטי TPO)

לאבחנה/טיפול

1. מסייע באבחון תת פעילות של בלוטת התריס על רקע מחלה אוטואימונית. 2. הבחנה מבדלת בין תת פעילות של בלוטת התריס הנובעת מהפרעות אוטואימוניות לבן תת פעילות של בלוטת התריס מסיבות אחרות. 3. כלי אבחוני בהחלטה האם לטפל בחולה שיש לו תת פעילות תת-קלינית של בלוטת התריס.

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

IU/ml

תחום ערכים תקינים

0-34

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

UK NEQAS for General Autoimmune Serology

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות