

Homovanillic (HVA), Random, Urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

84585

שם הבדיקה

Homovanillic (HVA), Random, Urine

شمונות נוספים לבדיקה

אקראי בשתן ולינית-הומו חומצה, HVA

לאבחנה/טיפול

Diagnosis of neuroblastoma or dopamine metabolism disorders

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבילות השיטה

Results may depend on medication or diet. A random collection may not fully reflect levels, limiting diagnostic reliability. Some patient will have normal values in random urine test, if highly clinically suspected, consider collection

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבוליית (ביוכימיה קלינית)

מקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולת את הדגימה

יש לשלו אמצעים כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוי הבדיקה

תנאים והכנות החוללה לפני הדיגום

יש להימנע ממזון ותרופות העולמים להשפיע על רמת האנאליטים הנמדדים תוך התיעצות עם הרופא המתפל.

סוג הדגימה

שתן אקריאי

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקווי

תנאי לקיהה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מארור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מארור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידת

mg/g creatinine

תחום ערכיים תקינים

ערכים תלוי גול

בקרות ותקני איקות

EQA בקרת איקות חיצונית - A

Instand Biogenic Amines

בקרת איקות חיצונית חלופית

ERNDIM Special assay urine

הסכמה/התעדת

שם הגוף/המסמיך/מתעד

מועד דיגום ותוצאות

משך הזמן מתקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צוין אחרת)

24 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות