

Platelet aggregation

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85576

שם הבדיקה

Platelet aggregation

שמות נוספים לבדיקה

אגרגציה של טסיות

לאבחנה/טיפול

אבחון של מחלות דם

שיטת ביצוע הבדיקה

Platelet aggregation (ADP, collagen, epinephrine, ristocetin)

מגבלות השיטה

במקרים של בדיקה המוליטית או ליפמית או כשיש מתחת ל 100,000 טסיות פוגע ברגישות הבדיקה ובתוצאה

הערות

הערות

10μM ADP 50μM epinephrine 10μM collagen 4μg/mlristocetin1.5mg/ml

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם](#)

מיקום המעבדה

חדר 112 קומה 0 בתוך בנק הדם

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302383

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

נא לשלוח את שתי המבחנות ביחד בשקית ישירות לבנק הדם ידנית או בטיל 100

המעבדה הקולטת את הדגימה

בנק הדם

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

הנבדק חייב להמנע מארוחות שומניות 12 שעות לפני הדגימה. ספירת הטסיות של המטופל חייבת להיות מעל 100,000.

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

ל"מ 2X3

כלי קיבול לדגימה

תכלת פקק ציטרט מבחנות 2x

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקיחה חלקה, עירבוב על ידי 5 היפוכים בלי הקצפה, בלקיחה כמבחנה ראשונה למלא צינורית. לשלוח מידית.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

6 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

הפרשנות של התוצאות היא בסמכות הרופאים בלבד



יחידת מידה

% אגרגציה מקסימלית

תחום ערכים תקינים

65