

ADAMTS-13 antibodies

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L6073

שם הבדיקה

ADAMTS-13 antibodies

שמות נוספים לבדיקה

נוגדנים ל- ADAMTS-13

לאבחנה/טיפול

בדיקה ל- TTP

שיטת ביצוע הבדיקה

Automated chemiluminescent assay

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם וקרישה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 חדר 284 מכון עמליה בירון

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5307349

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

נדרש תיאום עם מנהל בנק הדם או כונן קרישה.

המעבדה הקולטת את הדגימה

קרישה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ציטרט פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שליחה מידית.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

Bethesda units

תחום ערכים תקינים

מתחת ל- 0.5 יחידה

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה: