

Hepatitis B DNA כמותי HBV-DNA

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87517

שם הבדיקה

Hepatitis B DNA כמותי HBV-DNA

שמות נוספים לבדיקה

צהבת B DNA כמותי HBV הפטיטיס B כמותי

לאבחנה/טיפול

צהבת HBV- בדיקת HBV כמותית בשיטת RT-PCR-בדיקה לזיהוי מולקולתי כמותי לווירוס מסוג הפטיטיס HBV, B, שבה ניתן לזהות באופן ישיר את הימצאות הנגיף HBV אצל נושא הבדיקה החשוד כחולה בצהבת נגיפית מסוג B.

שיטת ביצוע הבדיקה

RT-PCR

מגבלות השיטה

תוצאה מתחת לתחום תופיע כ- $<ML/10IU$ תוצאה מעל לתחום תופיע כ- ML/IU
 $1,000,000,000<$

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

גורמים מחוץ לבית החולים: יש לצרף טופס מלווה של המעבדה.

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

מבחנה מלאה - 5 מ"ל לפחות

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לשלוח מיידית לאחר הלקיחה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור בטמפ' 2-6. יש לשלוח עם קרח תוך 48 שעות.

תנאי שינוע

לשלוח תוך 48 שעות בקירור 2-6 מעלות למעבדה. או להקפיא 70- מעלות ולשלוח קפוא תוך שבועיים. יש לשלוח בליווי טופס מלווה ייעודי.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדה ובטמפ' 70c- עד 6 שבועות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

IU/ML

תחום ערכים תקינים

בדיקה שלילית - DETECTED NOT בבדיקה חיובית - תוצאה כמותית: התחום הלינארי ML/IU
10-1,000,000,000 יירשם ערך מספרית תוצאה מתחת לתחום תהיה <10 ML/IU תוצאה מעל לתחום
תהיה 1,000,000,000 ML/IU