

# Aluminium

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

82108

**שם הבדיקה**

Aluminium

**שמות נוספים לבדיקה**

אלומיניום

**לאבחנה/טיפול**

חשיפה לאלומיניום

**שיטת ביצוע הבדיקה**

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית.

**מגבלות השיטה**

לא" - כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל\* $5\mu\text{g/l}$  LOQ: \*  
נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[טוקסיקולוגיה](#)

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302358/5

**מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

טוקסיקולוגיה

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

**דיגום ושינוע הבדיקה**

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

אין

**סוג הדגימה**

סרום

## נפח דגימה

10 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית פקוקה נטולת אבק וארוזה באריזה הרמטית

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לצרף למשלוח מבחנה ריקה מאותה הסדרה שבה נדגם הדם לשלילת זיהום אלומיניום במבחנה יש לשטוף את הכפפות במים מזוקקים להסרת הטלק לפני השימוש

## תנאי שינוע

קרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

µg/l

## תחום ערכים תקינים

<15 בחולי דיאליזה מודדים ריכוזים גם מעל ל-50

## בקורות ותקני איכות

### **EQA - בקרת איכות חיצונית**

אין

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

אין

### **הסמכה/התעדה**

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

בתיאום עם המעבדה

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות