

לא CSF אירובית לתרבית מותני מניקור CSF מניקור מותני לתרבית אירובית ואנאירובית

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8707087205

שם הבדיקה

ואנאירובית אירובית לתרבית מותני מניקור לא CSF אירובית לתרבית מותני מניקור CSF

שמות נוספים לבדיקה

Cerebrospinal fluid , CSF, Lumbar puncture , EVD, Reservoir, Shunt , CD, Drain

לאבחנה/טיפול

חשד למנינגו-אנצפליטיס, שינוי במצב הכרה, זיהום בתר ניתוחי

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים ומצע נוזלי). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת TOF MALDI בשיטת פטריות זיהוי. Gradient Test וב Disk Diffusion בשיטת, אוטומטית בשיטה רגישות. Bruker או Gradient Test בשיטת לפטריות רגישות. קלאסיות ידניות ובשיטות Bruker במכשיר MALDI TOF בשיטת Sensititre.

מגבלות השיטה

אין צורך בבקשה נפרדת לביצוע תרבית אנאירובית ותרבית פטריות

הערות

הערות

ספירה וכימיה - לשלוח למגה-לאבבדיקות לנגיפים - למעבדה הוירולוגית

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אתר הדיגום

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

חיטוי של האזור הנדגם עפ"י הנחיות של היחידה למניעת זיהומים

סוג הדגימה

נוזל עמוד שדרה מניקור מותני (LP) ניקור חדרניקור SHUNT / RESERVOIR שקית ניקוז חיצוניקז חדר

נפח דגימה

לפחות 3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת הברגה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

במקרה של מיעוט חומר יש ליצור קשר עם המעבדה לגבי תיעדוף הבדיקות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. צביעת גרם - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. Diffusion Disk - לתחום הערכים ניתן לפנות למסמך 100Performance-M CLSI
ניתן הערכים לתחום - Gradient Test. Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Guide Application Test-E לפנות ל-Guide Application Test-E ולהוראות השימוש מצורפות לכל פריט.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית אירובית שלילית - 5 ימים תרבית פטריות שלילית - 7 ימים תרבית אנאירובית שלילית - 14 ימים
תרבית אירובים/לפטריות חיובית - 10 ימים תרבית אנאירובית חיובית - 17 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

קליטה 24/7 עיבוד 24/7 תשובת צביעת גרם 24/7