

## צנתרים / אלקטרודות / גופים זרים לתרבית אירובית ופטריות

### תיאור הבדיקה

#### קוד CPT

87070

#### שם הבדיקה

צנתרים / אלקטרודות / גופים זרים לתרבית אירובית ופטריות

#### שמות נוספים לבדיקה

צנתר Electrode Hardware Foreign body CVC tip CNS catheter Blood system catheter tip  
מרכזי CATH- A-LINE HICKMAN PORT PICC צנתר דיאליזה צנתר עורקי צנתר מערכת עצבים  
מרכזית אלקטרודה קוצב לב

#### לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום ממקור הגוף הזר

#### שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטות Disk  
ידניות ובשיטות Bruker במכשיר MALDI TOF בשיטת פטריות זיהוי. Diffusion וב-Gradient Test.  
קלאסיות.

#### מגבלות השיטה

לא מבוצע משטח גרם במידה והגוף הזר לא ניתן לזריעה הוא יתורבת במצע העשרה בלבד. גוף זר  
אשר מוצא בגישה לא סטרילית אינו מהווה דגימה איכותית לא תבוצע תרבית לגוף זר אשר אינו נכנס  
בכוסית סטרילית.

## פרטי מעבדה מבצעת

### **מעבדה מבצעת**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

### **מיקום המעבדה**

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302305

### **מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

יש לציין במדויק את סוג החומרה במסך ההזמנה מרחוק

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

ניקוי העור מסביב לפתח ההוצאה והימנעות ממגע של הצנתר/אלקטרודה בעורשליחת מקטע באורך מקסימאלי של 5 ס"מ לאחר חיתוך בתוך כוסית הדיגום בעזרת סקלפל סטריליזציה להשאיר "זנב" מחוץ לכוסית הדיגום

## סוג הדגימה

צנתר מרכזי CATH- A-LINE HICKMAN PORT PICC דיאליזה צנתר עורקי צנתר מערכת עצבים מרכזית אלקטרודה (קוצב לב) אלקטרודה (מערכת עצבים מרכזית)

## נפח דגימה

5 ס"מ של הקטע העמוק ביותר של הצנתר

## כלי קיבול לדגימה

כוסית סטרילית

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר לקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

## תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר לקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

אין לשלוח גוף זר שאינו נכנס בכוסית סטרילית.

### יחידת מידה

לא רלוונטי

## תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה  
אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך Standards Performance:100-M CLSI  
for Antimicrobial Susceptibility Testing Gradient Test - ל-E-Test Application ניתן  
פריט לכל מצורפות השימוש ולהוראות Guide

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

### בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

### הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

### שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צוין אחרת)

תרבית אירובית, אנאירובית/פטריות שליליות - 7 ימים תרבית אירובית/אנאירובית/פטריות חיובית - 10 ימים

## ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

קליטה 24/7 עיבוד 24/7

### הערות

#### הערות

יש לחתוך את הצנתר/אלקטרודה בגישה סטרילית ללא מגע עם העור.