

תרבית קרנית (מטוש ייעודי לדיגום)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8707087205

שם הבדיקה

תרבית קרנית (מטוש ייעודי לדיגום)

שמות נוספים לבדיקה

Cornea

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום באתר הנדגם

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים ומצע נוזלי). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת TOF MALDI
בשיטת פטריות זיהוי. Disk Diffusion וב-Gradient Test ובשיטות אוטומטית בשיטה רגישות. Bruker
קלאסיות ידניות ובשיטות Bruker במכשיר MALDI TOF.

מגבלות השיטה

מבוצע ממטוש ייעודי בלבד

הערות

הערות

המטושים נמצאים במחלקת עיניים

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

משטח על סלייד זכוכית יש להכין במחלקה ישירות מחומר הדיגום על ידי סקלפל ולשלוח בצלחת פטרי ריקה עם מדבקת חולה קטנה על החלק העליון של הזכוכית

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

גרד או מיטוש קרנית

נפח דגימה

כמות מירבית של חומר ביולוגי

כלי קיבול לדגימה

ייעודי E-swab

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

מטוש ייעוד לתרבית קרנית נדגם במחלקת עיניים בלבד.

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. צביעת גרם - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך CLSI M-100: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Gradient Test - ניתן לפנות ל-Guide Application Test-E ולהוראות השימוש מצורפות לכל פריט.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית אירובית, אנאירובית/פטריות שליליות- 7 ימים תרבית אירובית/אנאירובית/פטריות חיובית - 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

קליטה 24/7 עיבוד 24/7 תשובת צביעת גרם 24/7