

## תרבית במטוש ממערכת מין (נשית / גברית) לתרבית מאירובית ופטריית

### תיאור הבדיקה

#### **קוד CPT**

87070

#### **שם הבדיקה**

תרבית במטוש ממערכת מין (נשית / גברית) לתרבית מאירובית ופטריית

#### **שמות נוספים לבדיקה**

צוואר הרחם הפרשה לאחר לידה (מטוש) שליה צד אימהי (מטוש) שליה צד עוברי (מטוש) שופכה  
(מטוש) כיב מגניטליה נשית (מטוש) כיב מגניטליה גברית (מטוש) כיב אחר (מטוש) Cervix  
(מטוש) Genital (מטוש) Placenta (מטוש) partum-Post (מטוש) Ulcer (מטוש)

#### **לאבחנה/טיפול**

חשד לזיהום באתר הנדגם

#### **שיטת ביצוע הבדיקה**

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת TOF MALDI במכשיר Bruker. רגישות בשיטה אוטומטית  
ובשיטות Diffusion Disk וב-Test Gradient. זיהוי פטריות בשיטת TOF MALDI במכשיר Bruker  
ובשיטות ידניות קלאסיות.

#### **מגבלות השיטה**

תרבית ורגישות בשאלה של זיבה (גונוריה) יש להזמין בנפרד בחלון המתאים ולהביא למעבדה  
במהירות לא מבוצע משטח גרם ממטוש (למעט לזיבה), לא מבוצעת תרבית אנאירובית ממטוש, לא  
נזרע נוזל העשרה ממטוש

## הערות

### **הערות**

תרבית בשאלה של זיבה (גונוריאה) יש להזמין בנפרד

## פרטי מעבדה מבצעת

### **מעבדה מבצעת**

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

### **מיקום המעבדה**

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302305

### **מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

## תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

חיטוי חיצוני ככל שניתן על פי אתר הדיגום

## סוג הדגימה

מטוש מצוואר הרחם מטוש מהפרשה לאחר לידה מטוש משליה צד אימהי מטוש שליה צד עוברימטוש שופכה מטוש מכיב מגניטליה נשית מטוש כיב מגניטליה גברית מטוש מכיב אחר

## נפח דגימה

לא רלוונטי

## כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול)

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

## תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

## קריאת תוצאות

מידע כללי

## יחידת מידה

לא רלוונטי

## תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה  
אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך Standards Performance:100-M CLSI  
Application for Antimicrobial Susceptibility Testing. Gradient Test - ניתן  
פרוט לכל מצורפות השימוש ולהוראות Guide

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

### בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

### הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

### שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית אירובית /פטריות שליליות- 7 ימים תרבית אירובית/פטריות חיובית - 10 ימים



**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא