

עצם מח, דם: דם בבקבוק Mycobacteria

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87116

שם הבדיקה

עצם מח, דם: דם בבקבוק Mycobacteria

שמות נוספים לבדיקה

BloodBone marrow MycobacteriumMOTTNTMTBTuberculosisשחפת

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום במיקובקטריה

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית באינקובטור ייעודי BD Bactec צביעת Fast Acid ידנית או במכשיר Aerospray זיהוי בשיטת
Rapid & slow growing mycobacteria ל-Sensititre ב- רגישות. Bruker MALDI-TOF

מגבלות השיטה

יש לבקש בקבוקים ייעודיים מהמעבדה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

בחדש ל-haemophilum.M יש לדגום בשני בקבוקים ייעודיים

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בדומה לתרבית דם רגילה

סוג הדגימה

דם, מח עצם

נפח דגימה

5 מ"ל בקבוק Lytic F/Myco

כלי קיבול לדגימה

בקבוק מיוחד Lytic F/Myco אותו מקבלים במעבדה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות וצביעת fast Acid - לא רלוונטי. זיהוי בשיטת TOF-MALDI - לא רלוונטי. רגישות ב-Sensititre ניתן לפנות למסמך Mycobacteria of Testing Susceptibility fore Standards Performance, Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

43 ימים לתרבית שלילית 65 ימים לתרבית חיובית

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא