

Myco bacteria שתן :תרביית

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87116

שם הבדיקה

Myco bacteria שתן :תרביית

שמות נוספים לבדיקה

Urine Mycobacterium MOTT NTMTB Tuberculosis שחפת

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום במיקובקטריה

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת Fast Acid ידנית או במכשיר Aerospray תרביית במצע מוצק Jensen-Lowenstein ותרביית במצע נוזלי במכשיר BD MGIT זיהוי בשיטת Bruker TOF-MALDI רגישות ב-Sensititre ל-Rapid & slow growing mycobacteria

מגבלות השיטה

לא מבצעים צביעה למתגים יציבי חומצה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

שתן ראשון של הבוקר

סוג הדגימה

שלוש דגימות משלושה ימים שונים

נפח דגימה

מ"ל 40

כלי קיבול לדגימה

כוסית סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור : $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות וצביעת fast Acid - לא רלוונטי. זיהוי בשיטת TOF-MALDI - לא רלוונטי. רגישות ב-Sensititre ניתן לפנות למסמך Mycobacteria of Testing Susceptibility fore Standards Performance, Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

70 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא