

בדיקת נוגדנים ל-*granulosus Echinococcus*

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86060

שם הבדיקה

בדיקת נוגדנים ל-*granulosus Echinococcus*

שמות נוספים לבדיקה

אכינוקוקוסידוזיס disease Hydatid

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום באכינוקוק

שיטת ביצוע הבדיקה

CLIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay

מגבלות השיטה

באישור רופא מיקרוביולוג במעבדה

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

כל דגימה חיובית נשלחת למרכז הארצי לפרזיטולוגיה ירושלים

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בחדש קליני גבוה נא לשלוח דגימה נוספת לפחות שבועיים ממועד הדיגום הראשוני.

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל של דם

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור : $8^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: $8^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

Index

תחום ערכים תקינים

פחות מ-0.9

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

????? ??????? ???????

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

