

Anti-AQP4 (CBA titration)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88347

שם הבדיקה

Anti-AQP4 (CBA titration)

שמות נוספים לבדיקה

לאבחנה/טיפול

מעקב. שיטת הטיטרציה הינה סמי-כמותית למעקב אחר התפתחות המחלה. עקרון בדיקת ה-AQP4
עולים במיהולים CSF או סרום דגימת עם AQP4 המבטאים תאים הדגרת על מבוסס IgG

שיטת ביצוע הבדיקה

Cell Based Assay

מגבלות השיטה

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים
הקלינים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

הערות

הערות

פנה למעבדה לקבלת ההסברים

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בירואימונולוגיה](#)

מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305786

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ניתן להזמין בדיקה זו בתנאי שהתקבלה תשובה חיובית לנוגדנים ל-AQP4 בבדיקה קודמת. הבדיקה הינה בסל ומבוצעת אמבולטורית תמורת התחייבות כספית או תשלום. לצורך השלמת הבדיקה יש ליצור קשר עם עם מזכירות המרכז לטרשת נפוצה בטל' 03-5303811/3911 הבדיקה מבוצעת גם במסגרת אשפוז.

המעבדה הקולטת את הדגימה

בירואימונולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם לסרום, פלזמה ו-CSF

נפח דגימה

6 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית או ספירה או CSF

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

18-24°C

תנאי שינוע

18-24°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעתיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

קריאת תוצאות : הדגימה נבדקת במיהולים 1:10, 1:100, 1:1000 המיהול האחרון עם תגובה חיובית נחשב טיטר.

יחידת מידה

Titer

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

IFQ-Lubeck

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO9001:2016

שם הגוף המסמך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

21 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות