

## Albumin-blood

### תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

82040

**שם הבדיקה**

Albumin-blood

**שמות נוספים לבדיקה**

דם-אלבומין, Albumin

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Colorimetric (BCG) (AU5800)

**מגבלות השיטה**

תתכן הפרעה בגלל המוליזה או ליפמיה חזקה  
especially, gammopathy cases rare very  
monoclonal IgM (Waldenström's macroglobulinemia), may cause unreliable results.

### פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

על-אוטומטית

### **מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### **מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

על-אוטומטית

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

### **דיגום ושינוע הבדיקה**

### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

אין הוראות מיוחדות

### **סוג הדגימה**

סרום

### **נפח דגימה**

מבחנה מלאה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

## תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה החדרודש בטמפרטורה 2-8°C

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

g/dl

### תחום ערכים תקינים

3.6 - 5.5 ז/נ:

## בקורות ותקני איכות

## בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

## בקרת איכות חיצונית חלופית

### הסמכה/התעדה

ISO15189

### שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

### מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7