

Ammonia

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82140

שם הבדיקה

Ammonia

שמות נוספים לבדיקה

אמוניה

לאבחנה/טיפול

אבחון מצבי כשל של הכבד

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic, Enzymatic (AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה גורמת לעליה ניכרת בערך הנמדד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

המנע מהידוק אגרוף בזמן לקיחה הנח מבחנה על קרח ושלח מיד למעבדה.

סוג הדגימה

Plasma (LiHeparine)

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת לתיום הפרין פקק ירוק

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשים בקרח כתוש מיד לאחר הלקיחה, לשלוח מיד למעבדה. מחוץ לשיבא להפריד מיד לאחר הלקיחה, לשלוח למעבדה תוך שעתיים בקרור או להקפיא בשלשוח במהלך היום

תנאי שינוע

משלוח מידי בקרור תוך 30 דקות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת תאים מהפלסמה: 3 שעות בטמפרטורה: $2-8^{\circ}\text{C}$ 24 שעות בהקפאה -20°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

micg/dl

תחום ערכים תקינים

ז/נ: 31-123

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Ethanol/Ammonia Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

30 עד דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7