

Calcium-blood

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82310

שם הבדיקה

Calcium-blood

שמות נוספים לבדיקה

סידן בדם

לאבחנה/טיפול

מטרת הבדיקה היא לצורך אבחון וניטור מגוון רחב של מצבים המתייחסים לבריאות העצם, הלב, מערכת העצבים, הכליות...

שיטת ביצוע הבדיקה

Colorimetric Arsennazo III(AU5800)

מגבלות השיטה

זיהום ב- EDTA או אוקסלט יגרום לירידה משמעותית בריכוז הנמדד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה החדר 3 שבועות בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dl

תחום ערכים תקינים

8.1-10.4 ז/נ:

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7