

Creatine phosphokinase isoenzyme (CPK-MB)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82552

שם הבדיקה

Creatine phosphokinase isoenzyme (CPK-MB)

שמות נוספים לבדיקה

קריאטין פוספוקינאז איזואנזים (MB-CPK)

לאבחנה/טיפול

סמן לתפקוד שריר הלב

שיטת ביצוע הבדיקה

Enzymatic immuno-inhibition test(AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה גורמת לעליה ניכרת בערך הנמדדהפרעה בגלל ליפמיה ואיקטריה חזקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להמנע מדיגום אחרי פעילות גופנית נמרצת

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

יומיים בטמפרטורה החדר 7 ימים בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

% of CPK Total IU/L

תחום ערכים תקינים

0-6% of Total CPK / ז'נ: 0-25 L/IU

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

EQAS-CARDIAC MARKERS PROGRAM

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7