

Cytomegalovirus (CMV) Avidity

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86644

שם הבדיקה

Cytomegalovirus (CMV) Avidity

שמות נוספים לבדיקה

ציטומגלובירוס (CMV) Avidity

לאבחנה/טיפול

איתור מועד הזיום מנגיף CMV

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

מגבלות השיטה

המוליזה חזקה עלולה לשבש את המדידה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע ללקוחות מחוץ לשיבא בלבד, אחרת פנה למעבדה לנגיפים

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 14 ימים. מעל 14 ימים יש להקפיא ב- -20°

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש לשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

ניתן לשמור בטמפרטורה החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 14 ימים. מעל 14 ימים יש להקפיא ב- -20°

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%Avi.

תחום ערכים תקינים

Low Avidity 60%

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע רק במשמרת בוקר