

Eliquis-apixaban

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80299

שם הבדיקה

Eliquis-apixaban

שמות נוספים לבדיקה

לאבחנה/טיפול

רמת תרופה

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPChromogenic-enzymatic activity on small substrates

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00 03-530-3671 במשמרות: 03-5302100 או 03-5302747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

נא לציין בהזמנה זמן לקיחה יחסית לקבלת תרופה (שיא או שפל) מיועד למדידת רמת התרופה Eliquis-
בלבד apixaban

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לציין את מינון התרופה והזמן שעבר מקבלת תרופה האחרונה

סוג הדגימה

פלסמה (Citrata Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 4 שעות בטמפרטורת החדר.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 8 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

מדידת רמת תרופה בדם

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 60 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7