

Ferritin

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82728

תיאור הבדיקה

Ferritin

שמות נוספים לבדיקה

פריטין

לאבחנה/טיפול

ברור אנמיה

שיטת ביצוע הבדיקה

DxI 800Immunometric-Chemiluminescence

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים וניתן לשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד יומיים או בהקפאה בטמפרטורת -20°C -

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש לשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת הסרום מהתאים: עד 8 שעות בטמפרטורת החדר מעל 8 שעות ו-48 עד שעות בטמפרטורת $2-8^{\circ}\text{C}$ מעל 48 שעות בהקפאה ב -20°C -

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

ז/נ עד גיל שנה: 6-80 ז/נ מעל שנה עד 5 שנים: 6-60 ז/נ מעל 5 שנים עד 10 שנים: 6-55 נשים מעל 10 שנים עד 19 שנים: 6-40 זכר מעל 10 שנים עד 19 שנים: 23-70 נשים מעל 19: 11-233 זכר מעל 19 שנים: 24-300

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS IMMUNOASSAY

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 120 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7