

Glucose -blood

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82803

שם הבדיקה

Glucose -blood

שמות נוספים לבדיקה

גלוקוז-בדם

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Rapid Point 500enzymatic reaction, amperometry

מגבלות השיטה

אם לא בצום - הערכים לדם עורקי וקפילרי גבוהים בכ- 10%. איקטריה חזקה תגרום לעליה בערך הנמדד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע רק במסגרת פנל הגזים

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

צום 8 שעות לפני הבדיקה

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מזרק המכיל הפרין יעודי לבדיקות גזים סגור היטב בסגר ייעודי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקיחה ללא חשיפה לאויר, סגור מיד בסגר פלסטי, לשלח מיד למעבדה לאחר הלקיחה

תנאי שינוע

אם נישלח מיד לאחר הלקיחה, ניתן לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח מייד לאחר הלקיחה יש להצמיג לקרח ולשלוח תוך 20 דקות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

30 דקות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dL

תחום ערכים תקינים

ז/נ: 100-170 לנבדקים בצום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RIQAS -Blood Gas/ Oximetry

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 30 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7