

# Hepatitis B core IGM antibody (HBc IGM)

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

86705

## **שם הבדיקה**

Hepatitis B core IGM antibody (HBc IGM)

## **שמות נוספים לבדיקה**

נוגדן IGM של ליבת הפטיטיס HBc IGM - B

## **לאבחנה/טיפול**

הבחון מחלה צהבת מסוג B

## **שיטת ביצוע הבדיקה**

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

## **מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

### סוג הדגימה

סרום

### נפח דגימה

מבחנה מלאה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בקרור  $2-8^{\circ}\text{C}$  עד 7 ימים. מעל 7 ימים יש להקפיא ב- $-20^{\circ}$

## תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש ולשלוח בקרור.

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת סרום מהתאים עד 7 ימים בטמפרטות  $2-8^{\circ}\text{C}$ . מעל 7 ימים בהקפאה -  $20^{\circ}$  -

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

S/CO

### תחום ערכים תקינים

שלילי: קטן או שווה מ-1 חיובי: גדול מ-1

## בקורות ותקני איכות

## בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

## בקרת איכות חיצונית חלופית

## הסמכה/התעדה

ISO15189

## שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה

## ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

ביצוע מעבר לשעות העבודה חייב אישור של רופא בכיר מומחה כבד והפעלת כונן מגה