

Hepatitis B surface antigen (HBsAg)

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87340

שם הבדיקה

Hepatitis B surface antigen (HBsAg)

שמות נוספים לבדיקה

הפטיטיס B אנטיגן (HBsAg)

לאבחנה/טיפול

עשויה להצביע על הידבקות בצהבת מסוג B

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

מגבלות השיטה

המוליזה חזקה עלולה לשבש את המדידה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 7 ימים או להקפיא ב- 20°C מעלות

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש ולשלוח בקרור הקפאה או $2-8^{\circ}\text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת סרום מהתאים: 24 שעות בטמפרטורה החדר. 6 ימים בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

S/CO

תחום ערכים תקינים

שלילי: קטן מ-1 חיובי: גדול או שווה מ-1

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

ביצוע מעבר לשעות העבודה חייב אישור של רופא בכיר מומחה כבד והפעלת כונן מגה