

Hepatitis Be antibody (HBeAb)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86707

שם הבדיקה

Hepatitis Be antibody (HBeAb)

שמות נוספים לבדיקה

נוגדן Be להפטיטיס B- HBeAb

לאבחנה/טיפול

הידבקות בצהבת נגיפית מסוג B

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בטמפרטורת החדר עד 3 ימים או בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ בין 3-7 ימים ומעל 7 ימים שי להקפיא ב- 20°C .

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש ולשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת סרום מהתאים עד 3 ימים בטמפרטורה החדר. עד 7 ימים בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$. מעל 7 ימים בהקפאה 20°C -

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

S/CO

תחום ערכים תקינים

שלילי: קטן או שווה מ-1 חיובי: גדול מ-1

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע רק במשמרת בוקר