

Iron

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83540

שם הבדיקה

Iron

שמות נוספים לבדיקה

ברזל

לאבחנה/טיפול

ברור אנמיה

שיטת ביצוע הבדיקה

Photometric colour test(AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה- עליה ניכרת הערך הנמדדליפמיה- עליה ניכרת בערך הנמדדערכים בדגימת בוקר גבוהים ב- 30%

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

דגימת בוקר, בצום

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה החדר 3 שבועות בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

micg/dl

תחום ערכים תקינים

ז/נ עד 5 ימים: 148-222 ז/נ 6 ימים עד 19 שנים: 160-30 ז/נ מעל 19 שנים: 60-170

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7