

Potassium-blood

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84132

שם הבדיקה

Potassium-blood

שמות נוספים לבדיקה

אשלגן - בדם

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ISE Indirect(AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה מעלה את ערך הנמדד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח תוך שעתיים מהלקיחה. אם לא נשלח תוך שעתיים מהלקיחה חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים ולשלוח בקרור

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש לשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת הסרום מהתאים: עד 18 שעות בטמפרטורה החדרמעל 18 שעות ו7 ימים בטמפרטורה 20°C - ב בהקפאה 7 ימים מעל $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mEq/L

תחום ערכים תקינים

ז/נ: 3.5-5.2

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7