

Rivaroxaban- Xarelto

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80299

שם הבדיקה

Rivaroxaban- Xarelto

שמות נוספים לבדיקה

factor Xa inhibitor rivaroxaban, Rivaroxaban- Xarelto

לאבחנה/טיפול

רמת תרופה

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPChromogenic-enzymatic activity on small substrates

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671. כל ימות השבוע משעה 15:00: 03-530-2100

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

נא לציין בהזמנה זמן לקיחה יחסית לקבלת תרופה (שיא או שפל)

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לציין את מינון התרופה והזמן שעבר מקבלת תרופה האחרונה

סוג הדגימה

פלסמה (Citrata Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 4 שעות בטמפרטורת החדר.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 8 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

אין משמעות. מדידת רמת תרופה בדם

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 60 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7